
Präanalytik Gynäkozytologie

Geltungsbereich:

Standort Kantonsspital Aarau AG: M_PAT_ALLE

Typ:

010_Checkliste

Revision:

1.0

Status:

Freigegeben

Freigegeben am:

24.11.2025 10:39

1. Konventionelle Methode

Nach dem Ausstreichen die Objektträger sekundenschnell in Küvette mit Delaunay oder 96% Aethylalkohol fixieren, oder mit reichlich Fixationsspray besprühen und bis zum Versand trocknen lassen.

Wichtige klinische Angaben wie Kolposkopiebefund, LP (PMP), Gravidität und Geburt, IUD, Hormonmedikation, Chemo- und Strahlentherapie im Einsendeformular eintragen.

2. Dünnschichtmethode / ThinPrep

Nach der Abstrichentnahme die Bürste in der Flüssigkeit gut schwenken und die Bürste wegwerfen, nicht ins Gefäss geben.

Die Gefässe können bei Zimmertemperatur gelagert werden.

3. HPV-Typisierung / Chlamydien

Die Dünnschichtmethode bietet die Möglichkeit nach zytologisch gestellter Diagnose eine HPV-Typisierung durchzuführen. Auch der Nachweis von Chlamydien kann aus der ThinPrep-Flüssigkeit erfolgen.

Titel:

Präanalytik Gynäkozytologie

Revision:

1.0

ConSense Objekt Nr.:

34380300

CAVE: Ausdruck! Bitte neuste Revision in ConSense beachten!

Seite 1 / 1